


# MPG Healthcare

---

Schutzmasken

# KN95 Maske

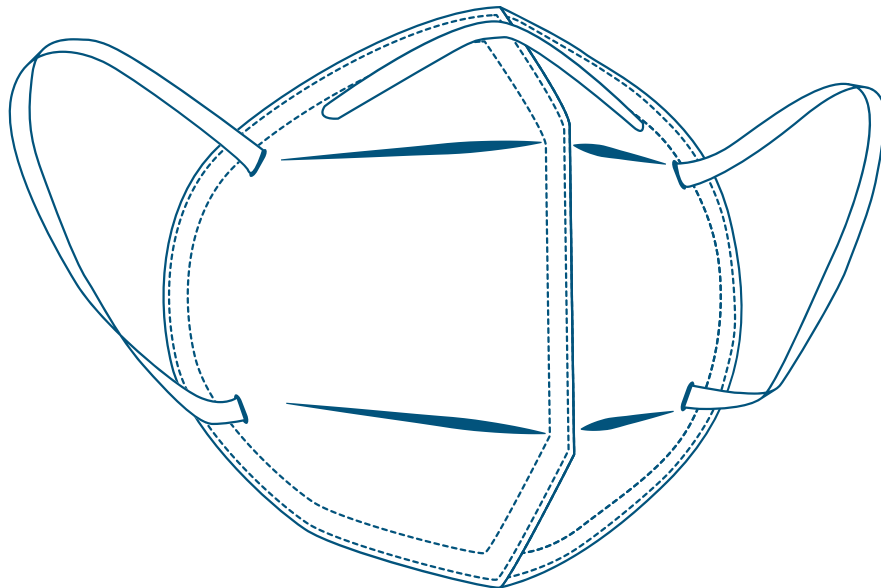

Die KN95 Maske ist ein zum einmaligen Gebrauch zu verwendender Atemschutz. Die KN95 Maske besteht aus vier hautfreundlichen Vliesstoffschichten mit integriertem Mikrofilter. Die mehrschichtige Maske kann effektiv vor Luftverschmutzung durch feine Partikel (PM 2,5) und Bakterien durch Luftverschmutzung schützen. Die Maske hat einen integrierten weichen und komfortablen Nasenclip sowie anpassbare, elastische und komfortable Ohrschlaufen.

## LAGERBEDINGUNGEN

In einem trockenen, belüfteten Raum und in nicht korrosiver Gasumgebung lagern. Von Feuer und brennbaren Materialien fernhalten.

## GÜLTIGKEITSDAUER

Unter den vorgeschriebenen Bedingungen gelagert, beträgt die Haltbarkeit 3 Jahre, das Verwendungsdatum ist auf der Verpackung angegeben.

## TRAGEDAUER

Die empfehlende Tragedauer ist max. 8 Stunden.

## WARNHINWEISE


- Es kann zu mangelnder Luftzirkulation kommen.
- Es kann zur Atemnot kommen.
- Nicht beim Schlafen verwenden.
- Nicht empfehlenswert für hypoxische Umgebungen und geringe Vitalkapazität.
- Wenn Sie beim Tragen der Maske nicht angenehm atmen können, bitte wechseln Sie die Maske.

## Produktvergleich KN95 – FFP2

Standard	KN95 (GB2626-2006)	FFP2 (EN149:2001)
Filterleistung (mind. $\geq X\%$ )	$\geq 95\%$	94%
Prüfstoff	NaCl	NaCl und Paraffinöl
Durchflussrate	85 L/min	95 L/min
Innere Leckage	$\leq 8\%$ Leckage	$\leq 8\%$ Leckage
Einatmungswiderstand	$\leq 350$ Pa	$\leq 70$ Pa (bei 30 L/min) $\leq 240$ Pa (bei 95 L/min) $\leq 500$ Pa (Verstopfung)
Durchflussrate	85 L/min	variabel, siehe oben
Ausatmungswiderstand (max. Druckabfall)	$\leq 250$ Pa	$\leq 300$ Pa
Anforderungen Leckage über Ausatemventil	Druckabfall von 0 Pa $\geq 20$ sec	N/A
Durchflussrate	85 L/min	160 L/min
Betätigungskraft	-1180 Pa	N/A
CO2 Freigabe Anforderung	$\leq 1\%$	$\leq 1\%$

Basierend auf diesen Informationen ist der Standard China KN95 (GB2626-2006) vergleichbar mit dem europäischen FFP2 Standard (EN 149:2001).

# MNS Maske – Typ I

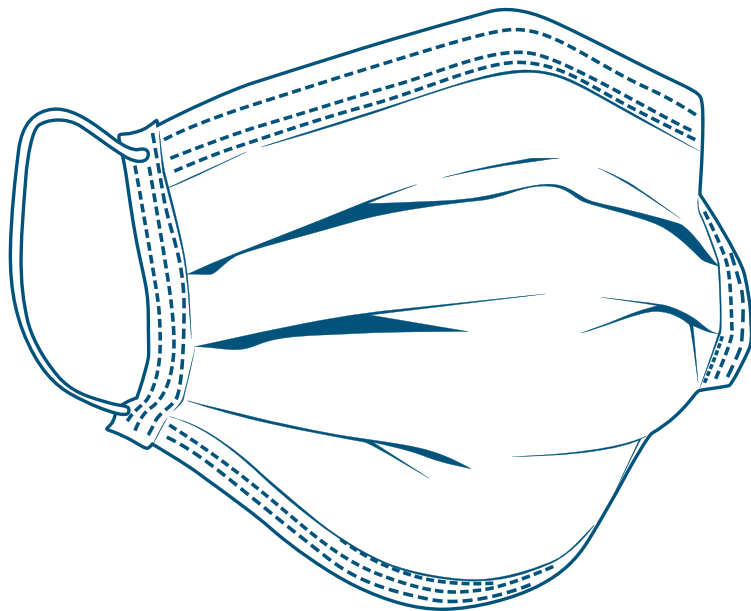

Die MNS Maske ist ein zum einmaligen Gebrauch zu verwendender Mund-Nasen-Schutz. Sie besteht aus drei hochwertigen feuchtigkeitsbeständigen Vliesstoffschichten, die einen starken Filtereffekt haben und einen sanften und komfortablen Tragekomfort bieten. Die MNS Maske kann individuell an jede Größe bis zu 17,5 cm x 9,5 cm/6.89“ x 3,74“ angepasst werden. Die Mund-Nasen-Schutzmaske hat einen stark dehnbaren und bei Anwendung weichen und komfortablen integrierten Nasenclip sowie verstellbare, elastische und komfortable Ohrschlaufen.

## LAGERBEDINGUNGEN

In einem Raum mit nicht mehr als 80% relativer Luftfeuchtigkeit lagern, frei von ätzenden Gasen und gut belüftet, um hohe Temperaturen zu vermeiden.

## GÜLTIGKEITSDAUER

Unter den vorgeschriebenen Bedingungen gelagert, beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre, das Verwendungsdatum ist auf der Verpackung angegeben.

## TRAGEDAUER

Die maximale Tragedauer beträgt 2 Stunden.

## WARNHINWEISE


- Es kann zu mangelnder Luftzirkulation kommen.
- Es kann zur Atemnot kommen.
- Nicht beim Schlafen verwenden.
- Wenn Sie beim Tragen der Maske nicht angenehm atmen können, bitte wechseln Sie die Maske.

Dieses Produkt ist konform mit der EN 14683:2019 über Medizinische Gesichtsmasken.


## MNS – Mund-Nasen-Schutzmasken

Das Tragen von MNS zur Prävention von SARS-CoV-2 im täglichen Leben wird wissenschaftlich empfohlen. (Feng et al., 2020). Die Mund-Nasen-Schutzmaske soll vor möglicherweise über Mund oder Nase abgegebene potentiell infektiöse Speichel- bzw. Schleimtröpfchen schützen (Fremdschutz). Umgekehrt kann die MNS den Träger vor potentiell infektiösen Tröpfchen schützen (Eigenschutz).

## Verpackungseinheit

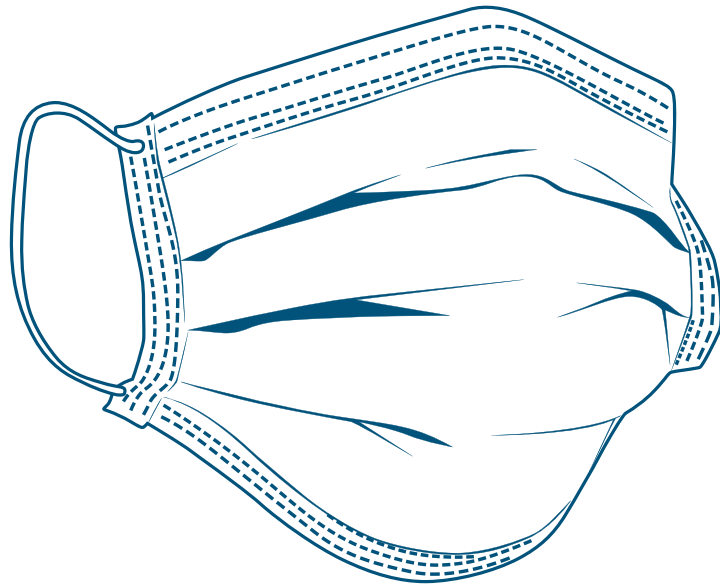

50 Stück / Box  
2.000 Stück / Karton  
Kleinmengen nur in 50-Stück-Packungen,  
ab 2.000 Stück nur je Karton bestellbar.

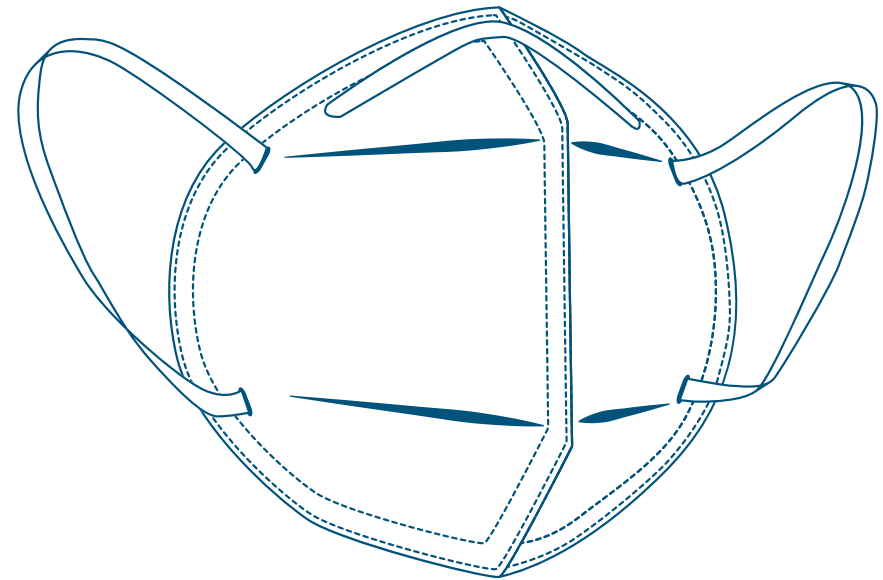

50 Stück / Box  
1.000 Stück / Karton  
Kleinmengen nur in 50-Stück-Packungen,  
ab 1.000 Stück nur je Karton bestellbar.

## Richtiger Umgang mit Schutzmasken

MNS und KN95 Masken können nur bei korrekter Nutzung Schutz bieten. Bei der Anwendung sollten Sie daher ein paar wichtige Punkte beachten:

Achten Sie beim Anlegen des Mundschutzes darauf, dass er gut sitzt und eng anliegt.



Ziehen Sie den Schutz über Mund, Nase und Kinn. Befestigen Sie die Bänder hinter den Ohren.

Berühren Sie den Mundschutz während des Tragens nun nicht mehr. Zupfen Sie nicht daran herum.



Die Außenseite könnte verkeimt sein!

Achten Sie beim Abnehmen des Mundschutzes darauf, die Vorderseite nicht zu berühren.



✘ Berühren Sie nicht die Vorderseite des Mundschutzes.

✔ Nehmen Sie den Schutz nur über die Bänder ab.

Nach der Abnahme: Waschen Sie Ihre Hände gründlich für mindestens 20 Sekunden.



Nutzen Sie dafür die nächste Gelegenheit. Auch ein Desinfektionsmittel kann hier nützlich sein.

# MPG Healthcare

---

**IMPORTEUR**

Michael Pachleitner Group  
Liebenauer Tangente 4  
8041 Graz  
Austria

[info@mpg-healthcare.com](mailto:info@mpg-healthcare.com)  
Datum: 22.04.2020